

Bloxaphte®

Acide Hyaluronique - Rose de Damas - Aloe Vera

BAIN DE BOUCHE

APHTES - LÉSIONS BUCCALES

Dispositif Médical : Flacon de 100ml

Bloxaphte® Bain de Bouche

- Soulage rapidement la douleur*
- Favorise la cicatrisation des aphtes et lésions buccales, en réduisant la durée de leur apparition
- Ne contient pas d'alcool (ne pique pas)

Grâce à sa formulation spécifique, **Bloxaphte® Bain de Bouche** agit efficacement par effet barrière, permettant une diminution rapide de la douleur locale et favorisant la cicatrisation des aphtes et lésions buccales. L'arôme menthe rend son utilisation agréable.

**par effet barrière*

Bloxaphte® Bain de Bouche est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Indications :

Aphtes

Lésions buccales

Composition :

Eau, Xylitol, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Polysorbate 20, Arôme menthe, Benzoate de sodium, Sorbate de potassium, Gomme de xanthane, Polycarbophile, Stévia, Acide lactique, Panthénol, Hyaluronate de sodium, Colorant, Extrait de feuilles d'Aloe Vera.

Mode d'emploi et posologie :

Effectuer un bain de bouche avec 10 ml de solution (l'équivalent d'un bouchon doseur) 2 fois par jour, ou plus si besoin, après les repas pendant une semaine, ou jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Refermer le flacon et rincer le bouchon doseur après chaque utilisation. Il est recommandé de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation du produit, afin de favoriser son imprégnation sur la muqueuse.

Stockage et conservation :

Conserver à une température inférieure à 25°C. La date d'expiration correspond à celle du produit intact et correctement conservé. Respecter les mêmes consignes de tri que tout autre déchet ménager.

Effets secondaires :

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effets indésirables connus ou prévisibles liés à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, consulter un médecin.

AVERTISSEMENTS :

- Le produit doit être utilisé dans la cavité buccale. Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.
- En cas de grossesse et chez les enfants de moins de trois ans, consulter un médecin avant toute utilisation.
- Lorsque vous l'utilisez en même temps que d'autres produits, vérifier avec votre médecin toute possibilité d'interaction.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Refermer le bouchon après chaque utilisation. Rincer le bouchon doseur après chaque utilisation.
- La date d'expiration imprimée correspond à celle du produit intact et correctement conservé.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser le produit si le récipient est endommagé.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utiliser le produit en respectant les consignes d'utilisation.
- Respecter les consignes de tri.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.

100ml e



Farmaceutici Procemsa S.p.A
Via Mentana 10 10042
Nichelino (TO) - Italy

Distributeur :

Laboratoire Chauvin - 416 rue Samuel
Morse F-34000 MONTPELLIER
Tel. : 04 67 12 30 30

| Description des symboles | |
|--------------------------|--|
| | Numéro de lot |
| | Date d'expiration / Date limite d'utilisation |
| | Fabricant |
| | Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi. |
| | Consultez la notice |
| | Ne pas disperser le produit dans l'environnement après utilisation |
| | Ne pas utiliser si endommagé |

®/TM sont des marques de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ou de ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated

www.bloxaphte.fr

BAUSCH + LOMB

462E01-06.17 / P1FR01

Dernière version : Avril 2017