

# Bloxaphte® junior

*Acide Hyaluronique - Rose de Damas - Aloe Vera*

---

## GEL JUNIOR

### APHTES - LÉSIONS BUCCALES

---

**Dispositif Médical :** Tube de 15ml avec applicateur

#### **Bloxaphte® Gel Junior**

- Soulage rapidement la douleur\*
- Favorise la cicatrisation des aphtes et lésions buccales, en réduisant la durée de leur apparition
- Ne contient pas d'alcool (ne pique pas)

Grâce à sa formulation spécifique, **Bloxaphte® Gel Junior** agit efficacement par effet barrière, permettant une diminution rapide de la douleur locale et favorisant la cicatrisation des aphtes et lésions buccales. L'arôme naturel de fruits rouges rend son utilisation agréable pour les enfants.

*\*par effet barrière*

**Bloxaphte® Gel Junior** est déconseillé aux enfants de moins de 30 mois.

#### **Indications :**

Aphtes  
Lésions buccales

#### **Composition :**

Eau, Xylitol, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Gomme de xanthane, Polycarbophile, Hydroxide de sodium, Hyaluronate de sodium, Pectine, Sorbate de potassium, Benzoate de sodium, Stévia, Panthénol, Arôme naturel de fruits rouges, Extrait de feuilles d'Aloe Vera.

#### **Mode d'emploi et posologie :**

Appliquer une petite quantité de gel sur la zone affectée, après les repas, à l'aide de l'applicateur ou avec des doigts propres ou un coton-tige. Appliquer deux ou trois fois par jour (ou plus, si nécessaire) pendant une semaine ou jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Refermer le bouchon après chaque utilisation. Il est recommandé de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation du produit, afin de favoriser son imprégnation sur la muqueuse. Ne pas conserver plus de 30 jours après ouverture.

#### **Stockage et conservation :**

Conserver à une température inférieure à 25°C. La date d'expiration correspond à celle du produit intact et correctement conservé. Respecter les mêmes consignes de tri que tout autre déchet ménager.

### Effets secondaires :

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effets indésirables connus ou prévisibles liés à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, consulter un médecin.

### AVERTISSEMENTS :

- Le produit doit être utilisé dans la cavité buccale.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.
- Lorsque vous l'utilisez en même temps que d'autres produits, vérifier votre médecin toute possibilité d'interaction.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Refermer le bouchon après chaque utilisation.
- La date d'expiration imprimée correspond à celle du produit intact et correctement conservé.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser le produit si le récipient est endommagé.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utiliser le produit en respectant les consignes d'utilisation.
- Respecter les consignes de tri.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.

15ml e



Farmaceutici Procemsa S.p.A  
Via Mentana 10 10042  
Nichelino (TO) - Italy

### Distributeur :

Laboratoire Chauvin - 416 rue Samuel  
Morse F-34000 MONTPELLIER  
Tel. : 04 67 12 30 30

Description des symboles	
	Numéro de lot
	Date d'expiration / Date limite d'utilisation
	Fabricant
	Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi.
	Consultez la notice
	Ne pas disperser le produit dans l'environnement après utilisation
	Ne pas utiliser si endommagé

®/TM sont des marques de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ou de ses filiales.

© Bausch & Lomb Incorporated

[www.bloxaphte.fr](http://www.bloxaphte.fr)

**BAUSCH + LOMB**

464E01-06.17 / P1FR01

Dernière version : Avril 2017