

# Bloxaphte<sup>®</sup> junior

*Acide Hyaluronique - Rose de Damas - Aloe Vera*

## GEL JUNIOR APHTES - LÉSIONS BUCCALES

**Dispositif Médical :** Tube de 15 mL avec applicateur

### **Bloxaphte<sup>®</sup> Gel Junior :**

- Soulage rapidement la douleur
- Favorise la cicatrisation des aphtes et lésions buccales, en réduisant la durée de leur apparition
- Ne contient pas d'alcool (ne pique pas)
- Ne contient pas de parabène
- Sans sucre

Grâce à sa formulation spécifique, **Bloxaphte<sup>®</sup> Gel Junior** agit efficacement par effet barrière, permettant une diminution rapide de la douleur locale et favorisant la cicatrisation des aphtes et lésions buccales. L'arôme naturel de fruits rouges rend son utilisation agréable pour les enfants.

### **Indications :**

Aphtes  
Lésions buccales

### **Composition :**

Eau, Xylitol, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Gomme de xanthane, Polycarbophile (1,3 %), Hydroxyde de sodium, Hyaluronate de sodium (0,24 %), Pectine, Sorbate de potassium (0,2 %), Benzoate de sodium (0,2 %), Stévia, Panthénol, Arôme naturel de fruits rouges, Extrait de feuilles d'Aloe Vera (0,05 %).

### **Mode d'emploi et posologie :**

Appliquer une petite quantité de gel sur la zone affectée, après les repas, avec des doigts propres ou un coton-tige. Appliquer deux ou trois fois par jour (ou plus, si nécessaire) pendant une semaine ou jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Refermer le bouchon après chaque utilisation. Il est recommandé de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation du produit, afin de favoriser son imprégnation sur la muqueuse. Bloxaphte<sup>®</sup> Gel Junior est déconseillé chez les enfants de moins de 30 mois.

### **Stockage et conservation :**

Conserver à une température inférieure à 25 °C. La date de péremption correspond à celle du produit intact et correctement conservé. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption figurant sur l'emballage. Utiliser le produit dans les 30 jours qui suivent sa première ouverture.

### AVERTISSEMENTS :

- Le produit doit être utilisé dans la cavité buccale.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.
- Il est recommandé d'informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
- Il est recommandé d'attendre au moins 2 heures avant d'utiliser tout autre médicament ou complément alimentaire.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Refermer le bouchon après chaque utilisation.
- La date de péremption imprimée correspond à celle du produit intact et correctement conservé.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser le produit si le récipient est endommagé ou non intact.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utiliser le produit en respectant les consignes d'utilisation.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement sans avoir consulté votre médecin.
- Respecter les consignes de tri des déchets.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.

### Effets secondaires :

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effets indésirables connus ou prévisibles liés à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, consulter un médecin.

Tout incident grave doit être signalé au fabricant et à l'autorité locale compétente qui fourniront des conseils supplémentaires.

15 mL e



Farmaceutici Procemsa S.p.A SB  
Via Mentana 10 - 10042  
Nichelino (TO) - Italy



Information médicale : 04 67 12 30 30

| Description des symboles |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Numéro de lot                                                                                                                            |
|                          | Date de péremption / Date limite d'utilisation                                                                                           |
|                          | Fabricant                                                                                                                                |
|                          | Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi. |
|                          | Consultez la notice                                                                                                                      |
|                          | À conserver à une température inférieure à 25 °C.                                                                                        |
|                          | Dispositif Médical                                                                                                                       |
|                          | Numéro de référence                                                                                                                      |
|                          | Identifiant unique du dispositif                                                                                                         |

®/TM sont des marques Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© 2026 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

[www.bloxaphte.fr](http://www.bloxaphte.fr)

**BAUSCH + LOMB**



1130962



NOTICE



464E06-10.25 / P1FR07 / 1440097

Dernière version : Octobre 2022