

# Bloxaphte®

Acide Hyaluronique - Rose de Damas - Aloe Vera

## SPRAY APHTES - LÉSIONS BUCCALES

**Dispositif Médical :** Flacon de 20 mL

### **Bloxaphte® Spray :**

- Soulage rapidement la douleur
- Favorise la cicatrisation des aphtes et lésions buccales, en réduisant leur durée
- Ne contient pas d'alcool (ne pique pas)
- Ne contient pas de parabène
- Sans sucre

Grâce à sa formulation spécifique, **Bloxaphte® Spray** agit efficacement par effet barrière, permettant une diminution rapide de la douleur locale et favorisant la cicatrisation des aphtes et lésions buccales. L'arôme menthe rend son utilisation agréable.

### **Indications :**

Aphtes  
Lésions buccales

### **Composition :**


Eau, Xylitol, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Polysorbate 20, Arôme menthe, Benzoate de sodium (0,3 %), Sorbate de potassium (0,2 %), Stévia, Gomme de xanthane, Polycarbophile (0,075 %), Acide lactique, Panthénol, Hyaluronate de sodium (0,03 %), Extrait de feuilles d'Aloe Vera (0,025 %).

### **Mode d'emploi et posologie :**

Placer l'embout sur la zone affectée et vaporiser le produit 2 fois par jour, ou plus si besoin, entre les repas, pendant une semaine, ou jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Il est recommandé de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation du produit, afin de favoriser son imprégnation sur la muqueuse. Bloxaphte® Spray est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

### **Stockage et conservation :**

Conserver à une température inférieure à 25 °C. La date de péremption correspond à celle du produit intact et correctement conservé. Utiliser le produit dans les 14 jours qui suivent sa première ouverture.

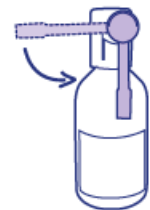

### **Effets indésirables :**

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effet indésirable connu ou prévisible lié à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, demander un avis médical.

**Tout incident grave doit être signalé au fabricant et aux autorités locales compétentes qui fourniront des conseils supplémentaires.**

## AVERTISSEMENTS :

- Le produit doit être utilisé dans la cavité buccale.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.
- Il est recommandé d'informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
- Il est recommandé d'attendre au moins 2 heures avant d'utiliser tout autre médicament ou complément alimentaire.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Refermer le bouchon après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement sans consulter votre médecin.
- La date de péremption imprimée correspond à celle du produit intact et correctement conservé.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser le produit si le récipient est endommagé ou non intact.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utiliser le produit en respectant les consignes d'utilisation.
- Respecter les consignes de tri des déchets.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux

20 mL e

 Farmaceutici Procemsa S.p.A SB  
Via Mentana 10 - 10042  
Nichelino (TO) - Italy

**CE**  
**0476**

Information médicale : 04 67 12 30 30

| Description des symboles                                                            |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numéro de lot                                                                                                                            |
|  | Date de péremption / Date limite d'utilisation                                                                                           |
|  | Fabricant                                                                                                                                |
|  | Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi. |
|  | Consultez la notice                                                                                                                      |
|  | Dispositif Médical                                                                                                                       |
|  | À conserver à une température inférieure à 25 °C                                                                                         |
|  | Numéro de référence                                                                                                                      |
|  | Identifiant unique du dispositif                                                                                                         |

®/TM sont des marques Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© 2026 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

[www.bloxaphte.fr](http://www.bloxaphte.fr)

**BAUSCH + LOMB**

**REF** 1130891



461E06-10.25/ P1FR06 / 1440091

Dernière version : Octobre 2022