

# Bloxgel™

Acide Hyaluronique - Rose de Damas  
Aloe Vera - Mauve - Camomille

---

## POUSSÉES DENTAIRES

### GEL 1<sup>ÈRES</sup> DENTS - SOULAGE LA DOULEUR\*

---

*\*par effet barrière*

**Dispositif Médical :** Tube de 15 mL

**BloxGel™ Poussées Dentaires** est un gel muco-adhésif qui forme rapidement un film sur la gencive qui soulage la douleur et l'inconfort lié à la poussée dentaire chez le nourrisson.

La formule contient de l'acide hyaluronique et de la pectine, des ingrédients capables de former un film sur la zone concernée.

Il contient aussi des extraits végétaux naturels de haute qualité (Pétales de Rose de Damas, Camomille, Aloe Vera et Mauve) qui ont une action adoucissante et rafraichissante.

**BloxGel™ Poussées Dentaires** ne contient pas de sucre, de miel, d'aspartame, de saccharine ou d'adouccissant artificiel, d'arômes, d'alcool ou d'anesthésique local.

#### **Indications :**

**BloxGel™ Poussées Dentaires** permet de diminuer la douleur\* et les rougeurs dues aux poussées dentaires chez le nourrisson (dès six mois), au niveau des zones concernées.

*\*par effet barrière*

#### **Composition :**

Xylitol, Eau, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Gomme de xanthane, Acide hyaluronique, Sorbate de potassium, Pectine, Benzoate de sodium, Acide Citrique, Extrait de Mauve Sylvestre, Extrait de fleur de Camomille Sauvage, Extrait de feuille d'Aloe Vera.

#### **Mode d'emploi et posologie :**

Appliquer assez de produit pour couvrir la zone concernée et masser doucement la gencive. Utiliser le produit préférentiellement après les repas et avant le coucher afin d'aider à la formation du film et de prolonger le soulagement. Utiliser trois à cinq fois par jour, dès que nécessaire. Refermer le bouchon après chaque utilisation. Ne pas conserver plus de 30 jours après ouverture.

#### **Stockage et conservation :**

Conserver à une température inférieure à 25°C. La date d'expiration correspond à celle du produit intact et correctement conservé.


### Effets secondaires :

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effets indésirables connus ou prévisibles liés à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, consulter un médecin.

### AVERTISSEMENTS :








Le produit est réservé à l'usage buccal. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des ingrédients. Un adulte doit appliquer le produit ; ne jamais laisser ce dispositif médical dans les mains d'un enfant pour éviter les risques de suffocation. Ne pas utiliser si le tube est endommagé lors de sa première utilisation. Vérifier avant sa première utilisation que le dispositif médical n'a pas de signe d'usure ou de déchirure. Si les symptômes ne s'améliorent pas, consulter un médecin. Ne pas utiliser après la date indiquée sur le tube et l'étui. Conserver le produit hors de la vue et de la portée des enfants.

15 mL e

 Farmaceutici Procemsa S.p.A  
Via Mentana 10 10042  
Nichelino (TO) - Italy

  
0476

Information médicale : 04 67 12 30 30

Description des symboles	
	Numéro de lot
	Date d'expiration / Date limite d'utilisation
	Fabricant
	Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi.
	Consultez la notice
	Ne pas utiliser si endommagé
	Dispositif Médical

®/TM sont des marques Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

[www.bloxaphte.fr](http://www.bloxaphte.fr)

**BAUSCH + LOMB**



466E04-03.22 / P1FR04 / 1435222

Dernière version : Novembre 2020