

Bloxaphte®

Acide Hyaluronique - Rose de Damas - Aloe Vera

BAIN DE BOUCHE APHTES - LÉSIONS BUCCALES

Dispositif Médical : Flacon de 100 mL

Bloxaphte® Bain de Bouche :

- Soulage rapidement la douleur
- Favorise la cicatrisation des aphtes, en réduisant leur durée
- Ne contient pas d'alcool (ne pique pas)
- Ne contient pas de parabène

Grâce à sa formulation spécifique, **Bloxaphte® Bain de Bouche** agit efficacement par effet barrière, permettant une diminution rapide de la douleur locale et favorisant la cicatrisation des aphtes. L'arôme menthe rend son utilisation agréable.

Indications :

Aphtes
Lésions buccales

Composition :

Eau, Xylitol, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Polysorbate 20, Arôme menthe, Benzoate de sodium (0,3 %), Sorbate de potassium (0,2 %), Gomme de xanthane, Polycarbophile (0,075 %), Stévia, Acide lactique, Panthénol, Hyaluronate de sodium (0,025 %), Colorant, Extrait de feuilles d'Aloe Vera (0,01 %).

Mode d'emploi et posologie :

Effectuer un bain de bouche avec 10 mL de solution (l'équivalent d'un bouchon doseur) 2 fois par jour, ou plus si besoin, après les repas pendant une semaine, ou jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Refermer le flacon et rincer le bouchon doseur après chaque utilisation. Il est recommandé de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'utilisation du produit, afin de favoriser son imprégnation sur la muqueuse.

Bloxaphte® Bain de Bouche est déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans.

Stockage et conservation :

Conserver à une température inférieure à 25 °C. La date de péremption correspond à celle du produit intact et correctement conservé. Utiliser le produit dans les 14 jours qui suivent sa première ouverture.


Effets secondaires :

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effets indésirables connus ou prévisibles liés à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, consulter un médecin.

Tout incident grave doit être signalé au fabricant et à l'autorité locale compétente qui fourniront des conseils supplémentaires.










AVERTISSEMENTS :

- Le produit doit être utilisé dans la cavité buccale. Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des composants.
- Il est recommandé d'informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
- Il est recommandé d'attendre au moins 2 heures avant d'utiliser tout autre médicament ou complément alimentaire.
- Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Refermer le bouchon après chaque utilisation. Rincer le bouchon doseur après chaque utilisation.
- La date de péremption imprimée correspond à celle du produit intact et correctement conservé.
- Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.
- Ne pas utiliser le produit si le récipient est endommagé ou non intact.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utiliser le produit en respectant les consignes d'utilisation.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement sans avoir consulté votre médecin.
- Respecter les consignes de tri des déchets.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants.

 Farmaceutici Procemsa S.p.A
Via Mentana 10 - 10042
Nichelino (TO) - Italy


0476

Information médicale : 04 67 12 30 30

Description des symboles	
	Numéro de lot
	Date de péremption / Date limite d'utilisation
	Fabricant
	Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi.
	Consultez la notice
	Dispositif Médical
	À conserver à une température inférieure à 25°C
	Numéro de référence
	Identifiant unique du dispositif

®/TM sont des marques Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

www.bloxaphte.fr

BAUSCH+LOMB

 1130880

  462E06-06.22 / P1FR06 / 1436216

Dernière version : Octobre 2022