

Bloxgel™

*Acide Hyaluronique - Rose de Damas
Aloe Vera - Mauve - Camomille*

POUSSÉES DENTAIRES

GEL 1^{ÈRES} DENTS - SOULAGE LA DOULEUR

Dispositif Médical : Tube de 15 mL

BloxGel™ Poussées Dentaires est un gel muco-adhésif qui forme rapidement un film sur la gencive qui soulage la douleur et l'inconfort lié à la poussée dentaire chez le nourrisson.

La formule contient de l'acide hyaluronique et de la pectine, des ingrédients capables de former un film sur la zone concernée.

Il contient aussi des extraits végétaux naturels de haute qualité (Pétales de Rose de Damas, Camomille, Aloe Vera et Mauve) qui ont une action adoucissante et rafraichissante.

BloxGel™ Poussées Dentaires ne contient pas de sucre, de miel, d'aspartame, de saccharine ou d'édulcorant artificiel, d'arômes, d'alcool ou d'anesthésique local, de parabène.

Indications :

BloxGel™ Poussées Dentaires permet de diminuer la douleur et les rougeurs dues aux poussées dentaires chez le nourrisson, au niveau des zones concernées.

Composition :

Xylitol, Eau, Glycérine, Extrait de pétales de Rose de Damas, Gomme de xanthane, Acide hyaluronique (0,2 %), Sorbate de potassium (0,1 %), Pectine, Benzoate de sodium (0,1 %), Acide Citrique, Extrait de Mauve Sylvestre (0,05 %), Extrait de fleur de Camomille Sauvage (0,05 %), Extrait de feuille d'Aloe Vera (0,05 %).

Mode d'emploi et posologie :

Appliquer assez de produit pour couvrir la zone concernée et masser doucement la gencive. Utiliser le produit préférentiellement après les repas et avant le coucher afin d'aider à la formation du film et de prolonger le soulagement. Utiliser trois à cinq fois par jour, dès que nécessaire. Refermer le bouchon après chaque utilisation.

BloxGel™ Poussées Dentaires est déconseillé chez les enfants de moins de 6 mois.

Stockage et conservation :

Conserver à une température inférieure à 25 °C. La date de péremption correspond à celle du produit intact et correctement conservé. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Utiliser le produit dans les 30 jours qui suivent sa première ouverture.

AVERTISSEMENTS :


Le produit est réservé à l'usage buccal. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs des ingrédients. Un adulte doit appliquer le produit ; ne jamais laisser ce dispositif médical dans les mains d'un enfant pour éviter les risques de suffocation. Ne pas utiliser si le tube est endommagé ou non intact lors de sa première utilisation. Vérifier avant sa première utilisation que le dispositif médical n'a pas de signe d'usure ou de déchirure. Si les symptômes ne s'améliorent pas, consulter un médecin. Ne pas utiliser après la date indiquée sur le tube et l'étui. Conserver le produit hors de la vue et de la portée des enfants. Utiliser dans les 30 jours après première ouverture. L'usage de ce produit n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 mois. Il est recommandé d'informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Effets secondaires :

Sur la base de la littérature scientifique, il n'y a pas d'effets indésirables connus ou prévisibles liés à l'utilisation du produit. En cas d'effets indésirables pendant l'utilisation, consulter un médecin.










Tout incident grave doit être signalé au fabricant et à l'autorité locale compétente qui fourniront des conseils supplémentaires.

15 mL e

 Farmaceutici Procemsa S.p.A
Via Mentana 10 - 10042
Nichelino (TO) - Italy


0476

Information médicale : 04 67 12 30 30

Description des symboles	
	Numéro de lot
	Date de péremption / Date limite d'utilisation
	Fabricant
	Consultez la notice pour toutes informations importantes quant à son utilisation, comme les recommandations et les précautions d'emploi.
	Consultez la notice
	À conserver à une température inférieure à 25 °C.
	Dispositif Médical
	Numéro de référence
	Identifiant unique du dispositif

®/TM sont des marques Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.

© 2022 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

www.bloxaphte.fr

BAUSCH + LOMB

 1130863



NOTICE



466E05-06.22 / P1FR06 / 1436210

Dernière version : Octobre 2022